

РОБОТ-ТРЕНАЖЕР «ГАВРЮША»

для отработки навыков извлечения инородного тела у младенцев




Инородное тело
(магнит)



Элементы питания (тип АА)

Индикация состояний робота-тренажера

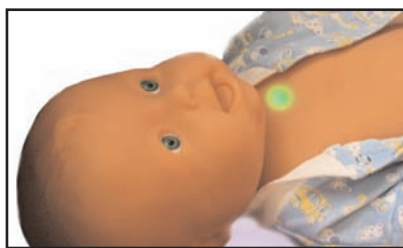

Зелёный светодиод: индикатор питания, подтверждает достаточный уровень заряда батарей, тренажер включен и готов к работе.



Синий светодиод: индикатор «умирания», сопровождается хрипами на вдохе. Если инородное тело не извлечь правильно в течение 30 секунд, у тренажера исчезнет пульс на плечевой артерии.




Красный светодиод: индикатор «оживления», сопровождающийся пронзительным криком. Самостоятельный пульс на плечевой артерии будет сохраняться около трёх минут.


Включение и выключение робота-тренажера



Вставить в рот тренажера «инородное тело» (магнит).

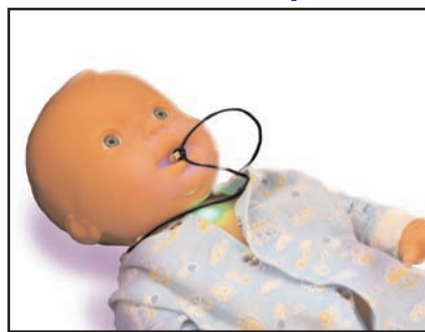

Тренажер включится, произойдёт самостестирование (загорятся все светодиоды и прозвучит звуковой сигнал), появится пульс на плечевой артерии, хрипы на вдохе и у робота начнёт синеть носогубный треугольник.

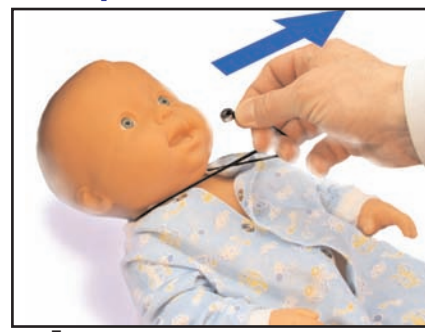

Для выключения тренажера следует вытащить инородное тело, а затем снова вставить и в течение 1 секунды вытащить его изо рта. Если в течение 30 секунд инородное тело не извлечено, тренажер «умирает» и выключается автоматически.


Извлечение инородного тела



При попытке извлечь инородное тело в положении лежа на спине или если угол переворота был недостаточный «Гаврюша» умирает: исчезает пульс на плечевой артерии.



Следует положить младенца животиком на свою ладонь так, чтобы его голова была ниже таза и указательным пальцем попытаться извлечь инородное тело. Если эта попытка не увенчалась успехом, следует нанести несколько шлепков по спинке или попе.

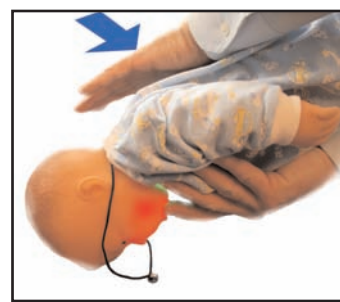

Шлепки следует наносить с ограниченной силой раскрытой ладони. Нельзя наносить удары ребром ладони или кулаком.

Правила замены элементов питания



Отвернуть контакт-заглушку монетой или отверткой.



Открыть контейнер для замены элементов питания.




Извлечь старые элементы питания и, соблюдая полярность («плюсом» вниз), вставить новые батарейки (тип AA).



Завернуть контакт-заглушку. Если элементы питания установлены правильно на 1 секунду загорится зелёный индикатор.



Вставить в рот тренажера «инородное тело» (магнит).

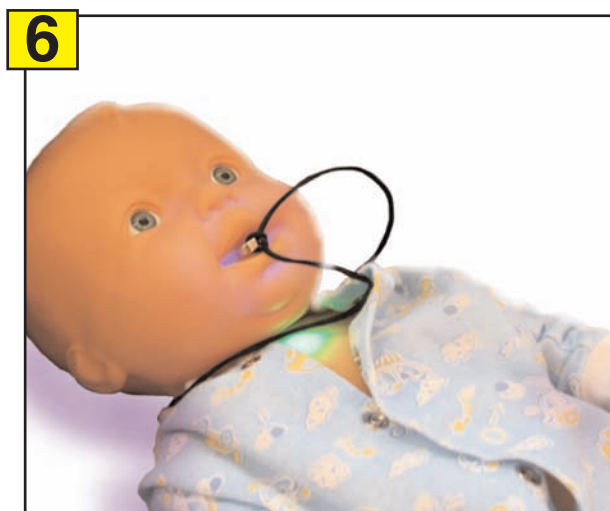

Произойдёт самотестирование робота, он готов к работе.

Запрещается заливать в тренажер жидкости или опускать его в воду!

Правила ухода: загрязненную пластизольную оболочку робота следует протирать тканевыми или ватными тампонами, смоченными спиртом или мыльным раствором.

Гарантийный срок: один год со дня продажи.
Производитель: ООО «ГАЛО»
Адрес: г. Москва, ул. Ибрагимова д. 31. корп. 10

(495) 642-85-65
www.galo.ru